



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**EL-KØRESTOL
ES-150 - ES-400**

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-KØRESTOL

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed/Forholdsregler	Side 4
Batteri & Opladning	Side 5
Betjening	Side 6
Funktioner	Side 7
Vedligehold	Side 8
Batteri informationer	Side 8
Frikobling af motor (ES-400)	Side 10
Justering af sæde (ES-400)	Side 11
Frikobling af motor (ES-150)	Side 12
Fold sammen (ES-150).....	Side 13
Garanti og service.....	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.

1 Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.

2 Batteri instruktioner og vedligeholdelse

Læs opladnings instruktionerne før køretøjet oplades. Køretøjet bør sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til hver 14. dag.

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt. Se yderligere information under opladning og batteri.

BATTERI & OPLADNING

3 Opladning

For at genoplade kørestolens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader.

Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt.

Forbind opladerens runde stik i kørestolens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

Tryk på "I" på opladerens tænd/slukknop.

Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul.

Når opladningen er fuldendt vil den gule lysdiode skifte til grøn.

Vi anbefaler at sætte kørestolen til opladning 1 gang i døgnet. Opladeren stopper selv når batterierne er fuldt opladt. Skal kørestolen ikke benyttes i længere tid, bør den sættes til opladning ca. hver 14. dag.

Under opladning skal du blot slukke for din kørestol. Kørestolens batteriindikator vil ikke informere dig om batteristatus under opladning, men kun under kørsel.

På kørestolen monteres opladeren i stikket du finder på undersiden af betjeningspanelet.

Vigtigt: Batteriet er ikke indbefattet af dansk reklamationsret.



BETJENING



FUNKTIONER

Tænd/Sluk

Tryk kort på Tænd/Sluk knappen for at tænde el-kørestolen.
Tryk og hold Tænd/Sluk knappen nede i ca. 3 sekunder, for at slukke
(Indtil kørestolen laver en advarselslyd)

Horn

Tryk på knappen for at kørestolen laver en hyletone / horn lyd.

Nedjustering af motor

Tryk på knappen for at kørestolens tophastighed bliver mindre. Den valgte hjælp kan ses på dioderne lige over knappen.

Opjustering af motor

Tryk på knappen for at kørestolens tophastighed bliver forøget. Den valgte hjælp kan ses på dioderne lige over knappen.

Batteriindikator

El-kørestolen er udstyret med en batteriindikator. Her kan man ses batteriveivauet på kørestolen.

VEDLIGEHOOLD & BATTERI

6

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din el-kørestol er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.

Forsikre dig at scooteren er ladet helt op.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Min. 22 PSI / 1,5 Bar. Max 44 PSI / 3 Bar.

Rengør el-kørestolen med jævne mellemrum, således sikres optimal levetid. Brug altid en pumpe med manometer, for at sikrer optimalt dæktryk.

Rengør ikke el-kørestolen med højtryksrensere.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

7

Batteri informationer

Din el-kørestol er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdelsesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model/årgang.

Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag du starter med at køre på din el-kørestol. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst

må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget el-kørestolen bliver brugt og hvordan. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din el-kørestol efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå el-kørestolens laks. Rækkevidde som du kan læse i el-kørestolens specifikationer. Køre du derimod i byen med megen start og stop, vil el-kørestolen bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 7 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus o.lign. vil kræve mere strøm og dermed nedsættes el-kørestolens rækkevidde.

HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ydelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.



FRIKOBLING AF MOTOR ES-400


Hvis **tilkoblet** betyder det, at kørestolen kan køres via joysticket

Hvis **frakoblet** betyder det, at kørestolen kan skubbes og ikke behøver være tændt.



Husk at frikoble håndtaget
bag begge hjul

Håndtaget er placeret
bag hjulet

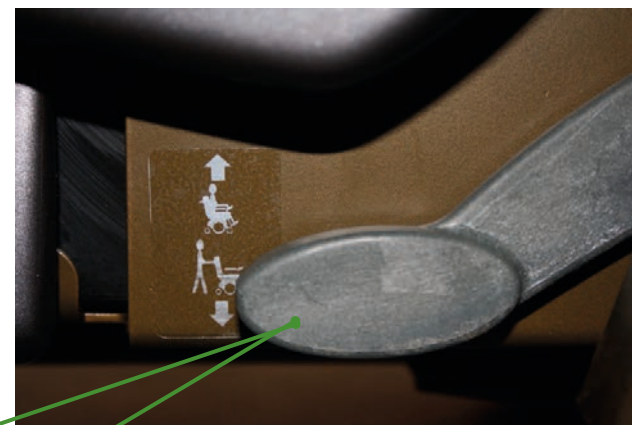

JUSTERING AF SÆDE ES-400



FRIKOBLING AF MOTOR ES-150

Hvis **tilkoblet** betyder det, at kørestolen kan køres via joysticket

Hvis **frakoblet** betyder det, at kørestolen kan skubbes og ikke behøver være tændt.



Ovenpå begge baghjul, er et rødt håndtag til frikobling af motoren. Drej henholdsvis håndtaget med eller mod uret for at tilkoble og frikoble.

Husk at frikoble på begge hjul.

FOLD SAMMEN ES-150

ES-150 kan foldes sammen, så den er nem at have med i bilen eller have den stående så den ikke fylder for meget.

Fold sammen

Trin 1 - Træk ud i den runde „lås“ på begge sider af kørestolen

Trin 2 - Skub ned i det lille „håndtag“ på begge sider af kørestolen, så den folder sig lidt sammen.

Trin 3 - Hold fast i ryglænet og tag fat under sædet og træk op.

Fold ud

Trin 1 - Hold fast i ryglænet og tag fat i sædet og skub sædet ned.

Trin 2 - Træk op i det lille „håndtag“ på begge sider af kørestolen, indtil den en siger en klik lyd i låsen, så er du sikker på den er foldet rigtigt ud og låst.



GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-kørestol til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle den el-kørestol du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-kørestol i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal el-kørestolens serviceprogram overholdes.

Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Dæktryk
- Hjulaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Motorbremse
- Instrumentbordet
- Motorbremse
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.