



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

OTIUMSTOL

BUDGET / LUKSUS

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG LÆNESTOL

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner stolen har. Derudover alt hvad du skal, for at vedligeholde din nye lænestol.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Pleje/vedligehold.....	Side 4
Betjening.....	Side 5-6
Garanti og Service	Side 7

PLEJE / VEDLIGEHOLD

Lindebjerg Otiumstole er udstyret med stof eller læder, alt efter model.

1 Otiumstol - stof

Der behøver du som udgangspunkt ikke pleje. Det er dog muligt at give en imprægnering som holder stoffet pænt i længere tid og letter rengøringen.

2 Otiumstol - læder

Vi anbefaler vi at give en læderpleje. Dette gerne et par gange om året alt efter brug. Dette holder læderet pænt og letter rengøringen af stolen.

3 Rengøring

En lindebjerg Otium stol er udstyret med højkvalitetsstof, i slidstærk styrke, og kan rengøres med en karklud, der er hårdt opvredet i lunken vand. Samme fremgang måde gør sig gældende til Lindebjergs Otium stole med Læder.

Spørg altid Lindebjerg for hjælp, hvis du har problemer med din Otiumstol.

BETJENING

Lindebjerg Otiumstol er udstyret med fjernbetjening til justering af ryk, sæde og stå op funktion. Bemærk funktionerne variere alt efter model.

3 BUDGET

Dette er fjernbetjeningen til Otiumstol budget

Denne knap bruges til at køre ryglænet og fodskammelen tilbage i neutral position. Når stolen er i neutral position, bruges denne knap også til at aktivere stå op funktionen.

Denne knap bruges til at køre ryglænet tilbage og fodskammelen op. Disse kan ikke indstilles separat.



4 STANDART / PREMIUM / LUKSUS

Dette er fjernbetjeningen til Otiumstol Standard/Premium/Luksus

Fodskammel ned / Er fodskammelen i neutral position, aktivere den stå op funktionen.

Fodskammel op / Køre ned, hvis stå op funktion er aktiveret.

Ryglæn op

Ryglæn tilbage

Køre ryglæn og fodskammel tilbage i neutral position, på samme tid / Aktivere stå op funktionen.

Køre ryglæn tilbage og fodskammel op, på samme tid / Køre stå op funktion tilbage til neutral position.



PREMIUM / LUKSUS

Dette er fjernbetjeningen til at styre massage og varme til Otiumstol Premium / Luksus


Display - Viser den „ON“ er den tændt. „OF“ så er den slukket. Derudover viser den tidsindstilling funktionen, hvis den er aktiveret. Henholdsvis 10, 20, 30 min.

Valgfri massage - Ønsker du ikke at bruge et automatisk program, kan du her selv vælge hvor i stolen der skal være massage. Du kan godt vælge flere på samme tid. Du tilvælger og fravælger ved trykke på knappen.

Varme - Slå varme fra og til. Lyser lampen udefor rød, er varmen tændt.

Intensitet - Her kan du vælge hvor kraftig massagen skal være. Du kan se hvor kraftig den er på „Intensitet display“

Mode - Her kan du vælge imellem 9 forskellige massage programmer. Her kan du prøve dig lidt frem og finde det program du bedst kan lide. Du kan se hvilket program du bruger på „Program display“. Tryk her for at starte massage.

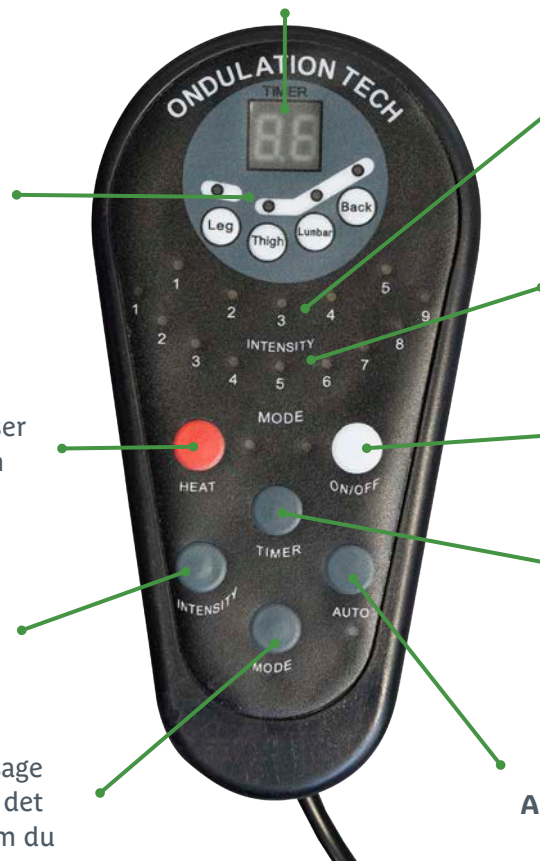

Intensitet display - Her kan du se hvor kraftig massagen er, 1 er det mildeste og 5 det kraftigste.

Program display - Her kan du se hvilket massage du har valgt. Du kan vælge imellem 9 forskellige.

Tænd/Sluk - Viser på displayet

Tidsindstilling - Her kan du sætte tid på hvor lang tid massagen skal være aktiveret. Du kan vælge henholdsvis 10, 20, 30 min. Tryk flere gange på knappen, for at vælge imellem minutterne. Du kan se på „Display“ hvor mange minutter du har valgt.

Auto - Starter et automatisk program.

GARANTI OG SERVICE

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; betræk eller motere etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din lænestol leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Købsdato: _____



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.