



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

LM SPEED 25

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed/Forholdsregler	Side 4
Sådan betjener du din elscooter	Side 5
Opladning	Side 5
El-scooteren	Side 6
Betjening og knapper	Side 7
Display	Side 8
Bliv klar til at komme ud og køre din nye el-scooter	Side 9
Vedligehold & batteri	Side 10
Få mere ud af dit batteri	Side 11
Sæde og opbevaringsrum	Side 12
Parkering	Side 13
Garanti og service	Side 14
Serviceskema	Side 15

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.

1 Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Under kørsel skal du altid gøre brug af sikkerhedssele eller styrt-hjelm.
- Køretøjet kræver kørekort til lille knallert, med mindre du er født før 1995. Du må ikke betjene køretøjet mindre du opfylder dette krav.
- Det er påkrævet at bruge selen under kørsel

2 Batteri instruktioner og vedligeholdelse:

Læs opladnings instruktionerne på side 9 før køretøjet oplades. Køretøjet bør sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til hver 14. dag.

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt. Se yderligere information omkring opladning og batteri på side 9 og 11.

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

3

Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som du modtager ved levering.

Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Tryk på "I" på opladerens tænd/slukknop. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul.

Når opladningen er fuldendt vil den gule lysdiode skifte til grøn. Vi anbefaler at sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker.

Vi anbefaler at lader tilsluttes efter endt kørsel hver gang. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbestandig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.



Oplader stik



Oplader stik


EL-SCOOTEREN



BETJENING OG KNAPPER



DISPLAY

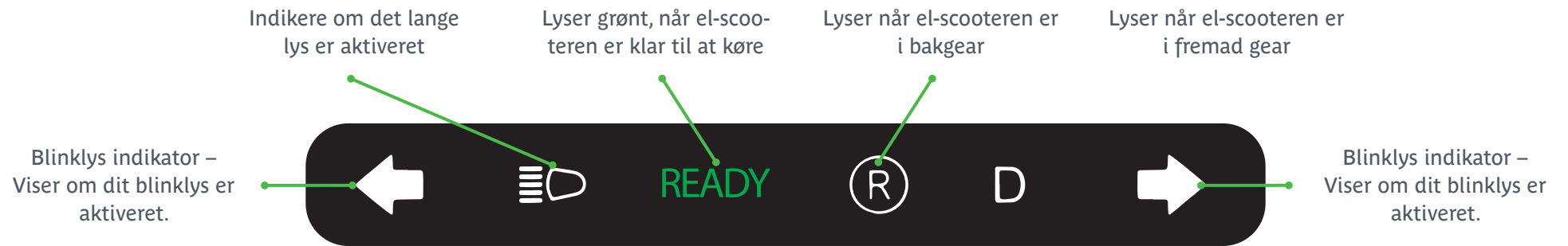

BLIV KLAR TIL AT KOMME UD OG KØRE DIN NYE EL-SCOOTER

4

Kørsel

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner. Bemærk – hvis du stille og roligt giver gas på gashåndtaget, vil du opnå en mere jævn kørsel. Husk at når du slipper gashåndtaget, bremses el-scooteren ikke før du trykker håndbremsen ind.


Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Din el-scooter anses som værende en lille knallert i færdselsloven. Du skal derfor agere som lille knallert i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden. Du må ikke køre i gågader og butikker.

Når du skal dreje, anbefaler vi at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys.

Tændingslås

Når du skal tænde din el-scooter, skal du sætte nøglen i tændingslåsen og dreje nøglen med uret. For at slukke el-scooteren, skal du dreje nøglen mod uret,

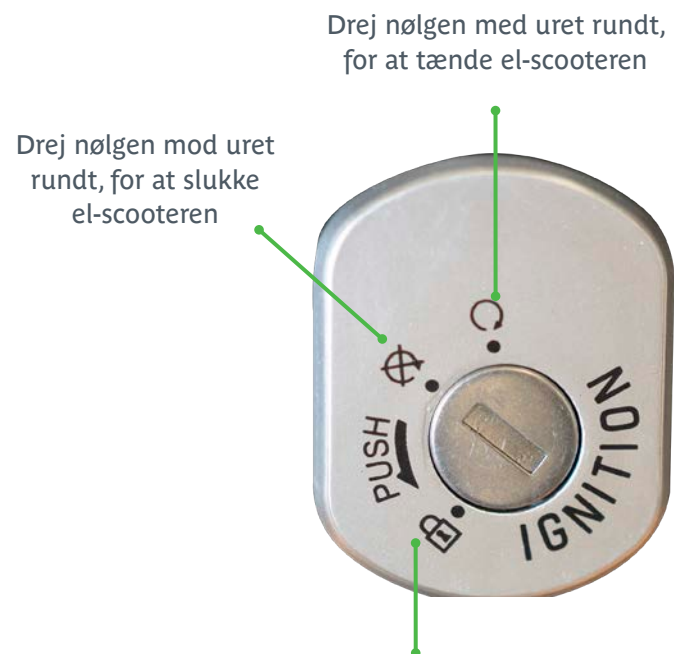

Ratlås – Drej først styret på el-scooteren helt til venstre. Derefter kan du trykke ind på nøglen og drej mod uret. Så er ratlåsen aktiveret.

VEDLIGEHOOLD & BATTERI

5

Batteri informationer

Din el-scooter er forsynet med 5 stk. 12V vedligeholdelsesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din el-scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og lademønster. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens maks rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus o.lign. vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

HUSK - Kø aldrig el-scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.

6

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.

Forsikre dig at scooteren er ladet helt op.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca 2,5 – 3 bar.

Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre



SÆDE OG OPBEVARINGSRUM

7 Sæde indstillinger

Din el-scooter er udstyret med et sæde med forskellige indstillingsmuligheder. Du kan både indstille sæde frem/tilbage, ryglæn og armlæn. Ser hvordan her:

Indstilling af vinkel på armlæn – Under armlænet sidder et lille hjul. Drej med eller mod uret for at indstille armlænet

Jurstering af ryglæn – Træk op i håndtaget for at indstille ryglænet.

Sæde frem og tilbage – Træk op i håndtaget for at indstille sæder



8 Opbevaringsrum

Under sædet på el-scooteren, er der et lille opbevaringsrum. Det kan du f.eks. bruge til at opbevare din oplader eller andet. Rummet er låst af med en nøgle.

Åben opbevaringsrum – Sæt nøglen ind og drej nøglen med uret, for at låse op.



Tag derefter fat i sædet og løft op, for at åbne ned til opbevaringsrummet.



I opbevaringsrummet finder du også hovedafbryderen.



PARKERING

9

Parkering af din el-scooter

Når du parkerer din el-scooter, er det vigtigt at du husker at låse håndbremsen, for at forhindre at el-scooteren skulle trille væk.

For at låse håndbremsen skal du først trykke håndbremsen ind. Samtidig med du holder håndbremsen inde, skal du trykke op på „Håndbremselåsen“. Derefter skal du blot slippe håndbremsen og efterfølgende slippe „Håndbremselåsen“.

For at løsne håndbremselåsen igen, skal du blot trykke ind på håndbremsen og bremsen vil selv løsne sig.

Håndbremselås

Håndbremse



GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremser, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.