



BRUGERMANUAL HF-150

HF-150 SORT | HF-150 MOKKA | HF-150 Grå
HF-150 RØD | HF-150 BLÅ

1. Introduktion	3
2. Sikkerheds- og advarselsmeddelelser	4
3. Anvendelse	5
4. Udpakning og kontrol af produktet	6
5. Produktmål og specifikationer	6
6. Delliste til din rollator.....	7
7. Opsætning af din rollator.....	8
8. Justering af håndtagene.....	8
9. Kontrol og justering af bremserne	9
10. Brug af bremsen og parkeringsbremsen	9
11. Vedligeholdelse	9
12. Rengøring	10
13. Opbevaring og transport	10
14. Tekniske data	10
15. Bortskaffelse.....	11

FORKLARING AF SYMBOLER











Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt vores oplysninger om installation og tilsigtet anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da dette annullerer garantien, og produktet fungerer muligvis ikke længere korrekt! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union. Når du er i udlandet, skal du også overholde landespecifikke retningslinjer og love.

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse
Brugermanual		Læs brugsvejledningen inden brug!

FORKLARING AF SYMBOLER

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse
Internationalt genbrugssymbol		Genanvendeligt materiale
Bortskaffelse		Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
CE-mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er lavet i overensstemmelse med alle lovkrav fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Inden- og udendørs		Velegnet til indendørs og udendørs brug.
ADVARSEL!		Dette symbol angiver en fare med et højt risikoniveau, vis dette ikke undgås, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL!		Dette signal symbol angiver en mulig farlig situation, som kan føre til mindre eller mindre kvæstelser, hvis dette ikke undgås.
ADVARSEL!		Dette signal symbo angiver en fare med medium risikoniveau, hvis dete ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
BEMÆRK!		Dette symbol giver dig nyttige yderligere oplysninger om montering eller drift og advarer om mulig materiel skade.

1. INTRODUKTION

Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med din nye Lindebjerg rollator. Vi takker dig for din tillid og håber du får stor glæde af dit nye produkt. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem. Fremfor alt skal du være opmærksom på sikkerheds- og advarselsmeddelelserne, samt vores meddelelser om den tilsigtede anvendelse!

Læs denne brugermanual omhyggeligt

Læs denne brugermanual igennem før installation og brug. Brugermanualen er beregnet til at gøre dig fortrolig med dit produkt. Samt oplyse om korrekt brug for at forhindre materielle- og personskader.

Følg instruktionerne i denne brugermanual

Følg altid instruktionerne og brug kun rollatoren som beskrevet i denne brugermanual. Forkert brug kan resultere i person- og eller materielle skader.

1. INTRODUKTION

Følges de nedenstående instruktioner ikke så kan levetiden afkortes betydeligt. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår ved forkert brug.

Foretag ikke ændringer

Foretag ikke ændringer på produktet! Selv små ændringer og modifikationer som kan ødelægge produktsikkerheden, så sikker brug ikke garanteres. Foretages der ændringer på produktet, så øges risikoen for kvæstelser og materielle skader.

Kontroller leveringen for skader og fuldstændighed

På trods af stor omhu kan vi ikke helt udelukke materielle og transportskader. Kontroller derfor straks efter udpakningen, om indholdet af leveringen er komplet og ubeskadiget. Hvis dele mangler eller er defekte, må du ikke samle eller bruge produktet. Kontakt straks kundeservice ved mangler eller defekter.

Opbevar disse brugsoplysninger

Opbevar brugsoplysningerne et sted, der er tilgængeligt for alle brugere. Hvis du videregiver produktet til tredjepart, skal du sørge for at give denne brugsinformation til den nye ejer.

2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER



ADVARSEL!

Det er vigtigt at overholde følgende sikkerheds- og advarseloplysninger. Læs dem omhyggeligt! Manglende overholdelse af reglerne og forkert brug kan resultere i alvorlig materiel skade og personskader. Vi påtager os intet ansvar for dette!

Kvælningsfare - akut livsfare!

Leveringsomfanget inkluderer forskellige smådele, som kan sluges. Emballagemateriale som folier og styrofoam er også inkluderet. Hold altid babyer, børn og kæledyr væk fra små dele og emballagemateriale. Lad aldrig babyer, børn og kæledyr lege med det. Forkert brug kan resultere i død ved kvælning. Opbevar emballagen og alle emballagefilm utilgængeligt for babyer, børn og kæledyr.



ADVARSEL!

- Udsæt ikke rollatoren for vejrforhold som regn, sne, hagl, frost, varme eller stærkt sollys.
- Brug ikke skarpe knive, sakse eller brevåbnere til at åbne emballagen.
- Brug kun rollatoren, hvis den er i perfekt stand uden forringelse eller beskadigelse.
- Løse skruer skal straks strammes igen!
- Beskadigede dele skal udskiftes med det samme - produktes sikkerhed garanteres ikke længere.
- Du må ikke bruge skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber, kraftige kemikalier eller slibemidler.
- Rollatoren kan maksimalt laste 136kg! En højere belastning kan skade og forringe sikkerheden på rollatoren.
- Rollatoren må ikke opbevares i fugtige rum med dårlig luftcirkulation.

2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Forsigtighed - risiko for kvæstelser!

- Vær forsigtigt og koncentreret under montering. Du kan skade dig selv og andre!
- Brug kun rollatoren i fuld besiddelse af dine fysiske, sensoriske og mentale evner!
- Rollatoren er ikke et legetøj! Hold babyer og børn væk fra ham og lad dem ikke lege med rollatoren!
- Opbevar emballagen utilgængeligt for babyer, børn og kæledyr. De kan blive fanget i det, det kan ende ud i kvælning og i sidste ende død.

3. ANVENDELSE



Gå altid med rollatoren lodret. Bøj ikke eller skub rollatoren langt foran dig. Dette kan få rollatoren til at rulle væk og forårsage alvorlige fald og kvæstelser. Når du går med rollatoren, så skal begge hænder være placeret på rollatorens håndtag. Skub aldrig rollatoren med kun en hånd - du kan miste kontrollen over rollatoren og skade dig selv.

Rollatoren fungerer udelukkende som støtte til bevægelse indendørs og udendørs. Det er ikke egnet som kørestol eller transportmiddel. Sørg for kun at bruge rollatoren på flade og faste overflader. Gå aldrig ned ad skråninger, trapper eller rulletrapper! Brug heller ikke rollatoren i stærk vind, regn, sne eller is. Undgå forhindringer, som vejdæksler eller afløbsriste, Det vil kunne resultere i at dækkene sidder fast. Vi advarer også mod brug under dårlige udsyn eller i mørke. Kør kun på fortove og aldrig på kørebanen.

Hvis du vil have en stok med dig, kan du fastgøre den til rollatoren. Du skal blot placere din stok i stokke holderen på ydersiden af rollatoren og fastgøre den til holderen med velcro under håndtaget.

Brug kun rollatoren i fuld besiddelse af dine fysiske, psykologiske, sensoriske og mentale evner! Brug ikke rollatoren, hvis du er under indflydelse af stoffer, alkohol eller stærk medicin, der forringer din mentale og / eller fysiske ydeevne.

Hvis du mister styrke, kan du tage plads på rollator sædet og hvile et stykke tid. Brug bremserne for at forhindre, at rollatoren ruller væk, og sæt dig derefter ned. Lad dig ikke falde på sædet. Bemærk også den maksimale belastningskapacitet på rollatoren på 136 kg! Selvom du mister styrke, må du ikke lade dig skubbe, mens du sidder på rollatoren! Hvis dette gøres alligevel, så vil der være risiko for at falde af.

Mindre genstande og indkøbsvare kan opbevares i indkøbsposen på forsiden. Sørg for, at du ikke overbelaster posen, og at der ikke stikker genstande ud af indkøbsposen. Brug kun denne bæreposen til opbevaring af genstande. Hæng ikke andre poser eller tasker på rollatoren. Dette kan forringe rollatorens stabilitet.

Rollatoren er kun egnet til privat brug. Brug den ikke til kommercielle formål!

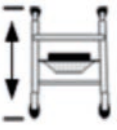


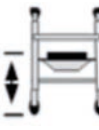





4. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET

Åbn forsigtigt emballagen på din rollator. Brug ikke skarpe knive, sakse, brevåbnere eller andre spidse eller skarpe genstande til at åbne. Disse kan beskadige produktet.

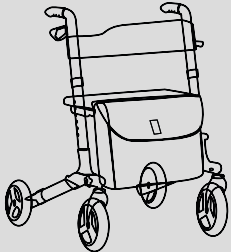
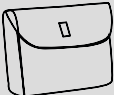

Tag rollatoren forsigtigt ud af emballagen og placer den på en blød, ikke-ridsende overflade. Brug listen over dele til at kontrollere, om nogen dele mangler eller er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du hverken samle eller betjene rollatoren. Produktsikkerhed er ikke garanteret i dette tilfælde! Kontakt straks vores kundeservice for mere information.

Emballagen skal opbevares utilgængeligt for babyer, småbørn og kæledyr. Der er en akut risiko for kvælning, hvis emballagen håndteres forkert.

5. PRODUKTMÅL OG SPECIFIKATIONER

Totalhøjde	Total-bredde	Total-dybde	Sæde-højde	Sæde-bredde	Sæde-dybde	Hjul-størrelse	Vægt	Max Belastning
								
Min. 76 cm Max. 95 cm	66 cm	73 cm	53 cm	46 cm	25 cm	20 cm	8,5 kg	136 kg

6. DELLISTE TIL DIN ROLLATOR

NR.	Beskrivelse	Tegning	Antal
①	Aluminiums rollator		x 1
②	Indkøbsnet		x 1
③	Stjerneskrue		x 4



Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
①	Ryglæn	⑤	Hjul (diameter 20 cm)
②	Parkeringsbremse / håndbremse	⑥	Indkøbsnet
③	Sædet	⑦	Stokkeholder
④	Højdejusterbare håndtag	⑧	Låsestift

7. OPSÆTNING AF DIN ROLLATOR



Din nye rollator leveres foldet sammen. For at gøre den klar til brug, så skal rollatoren foldes forsigtigt ud. Fortsæt med forsigtighed for ikke at skade produktet eller dig selv.

Når rollatoren foldes ud, skal du passe på ikke at klemme fingrene.

1. Fold forsigtigt forhjulene på din rollator ned, og fastgør dem med de medfølgende stjerneskruer.
2. Stil rollatoren lodret på forhjulene.
3. Fold forsigtigt baghjulene ned. Fastgør hjulene ved at indsætte stiften gennem hullet i rollatoren og derefter monteree den passende låsestift.
4. Hvis rollatoren står sikkert på alle fire hjul, skal du bare skubbe de to håndtag fra hinanden og trykke sædet ned.



Når du har opstillet rollatoren, skal bremserne funktionalitet kontrolleres. Brug kun rollatoren, hvis den fungerer korrekt. Du bør også justere placeringen af håndtagene. Foretag ikke yderligere ændringer i rollatoren! Dette vil forringe rollatorens sikkerhed.



8. JUSTERING AF HÅNDTAGENE



For at rollatoren kan støtte dig optimalt, skal den tilpasses til dig. Dette inkluderer tilpasning af rollatorens håndtag til den ønskede højde, for at kunne gå oprejst og sikkert. En knap er fastgjort til den ydre ramme er til dette formål. Skub den helt ind, og du vil derefter kunne løfte håndtagene op og ned. På denne måde skal du placere håndtagene i den ønskede højde. Sørg for, at begge håndtag er i samme højde for at sikre sikker gang.

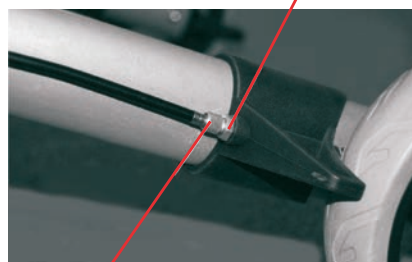
Knappen skal være i samme højde på begge sider

9. KONTROL OG JUSTERING AF BREMSERNE

Inden du begynder at bruge din rollator, skal du kontrollere at bremsene fungerer korrekt. For at gøre dette skal du trække forsigtigt i bremse armene og aktivere parkeringsbremsen. Hvis rollatoren ikke bremses, eller hvis den kan flyttes på trods af den aktiverede parkeringsbremse, skal du justere bremsene igen!

Du har ikke tilladelse til at bruge rollatoren i denne periode! Der er risiko for personskade. For at justere bremsene skal du først løsne låsemøtrikken. Drej derefter justeringsskruen mod uret. På denne måde øger du gradvist spændingen på bremsene. Fix derefter indstillingen ved at dreje låsemøtrikken med uret for at fastgøre justeringsskruen.

Låsemøtrik



Justeringsskruen

10. BRUG AF BREMSEN OG PARKERINGSBREMSEN

På hver af de to håndtag er der monteret en bremse. Det gør det muligt at nedbringe rollatoren i fart. For at gøre dette skal du blot trække begge bremse armene op mod dig på samme tid. Når rollatoren er stoppet helt, skal du trykke begge bremse armene ned samtidigt, og så vil du høre et klik. Dette aktiverer parkeringsbremsen, og rollatoren kan ikke længere rulle væk. Træk forsigtigt begge bremse armene opad for at frigøre parkeringsbremsen.

Advarsel! Aktivér altid parkeringsbremsen, inden du sidder på rollatoren. Kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret korrekt, ellers kan rollatoren begynde at bevæge sig, og dette kan resultere i materiel og eller personskade.

11. VEDLIGEHOLDELSE

Afhængigt af hvordan rollatoren opbevares og bruges, kan din rollator muligvis vise tegn på slid over tid. Du bør derfor kontrollere regelmæssigt for skader og defekte dele. Kontakt straks kundeservice, hvis du opdager mangler. Kontroller alle skruerne regelmæssigt. Dette gælder især skruerne på hjulene. Løse skruer bringer produktsikkerheden i fare. Alvorlige eller endda livstruende skader kan forekomme under brug. Du bør derfor straks stramme eventuelle løse skruer igen.

Vigtig! Kontroller bremsene regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Over tid kan bremsekablerne strække sig, hvilket får bremsene til at miste greb. Hvis du bemærker nogen forringelser, skal bremsene straks justeres igen. Hvis omjustering ikke medfører nogen forbedring, bedes du kontakte kundeservice for at diskutere, hvordan du fortsætter. Brug ikke rollatoren i denne periode!

12. RENGØRING

Snavs har en negativ indvirkning på materialeegenskaber og funktionalitet. Af denne grund anbefaler vi, at du rengør rollatoren grundigt med jævne mellemrum.

For at fjerne støv og snavs fra rollatoren skal du tørre det regelmæssigt med en ren, let fugtig klud. Til hårdere tilsmudsning tilsættes lidt mild opvaskemiddel til vandet. Sørg for, at der ikke er nogen sæberester tilbage på overfladen efter rengøring.

Brug aldrig skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber til rengøring. De forårsager grimme ridser på overfladen, hvilket gør materialet mere modtageligt for skader og rust. Undgå at bruge aggressive kemikalier eller slibemidler, da disse kan beskadige materialer og overflader.

13. OPBEVARING OG TRANSPORT

Hvis du vil opbevare eller transportere rollatoren, anbefaler vi, at du folder rollatoren omhyggeligt sammen. Dette sparer plads og gør transport og opbevaring meget lettere for dig. Træk blot håndtaget på sædet på din rollator opad. Monter hjulene som beskrevet i kapitel 7, punkt 3. Du kan derefter klappe hjulene forsigtigt op.

Opbevar rollatoren på et tørt, varmt og godt ventileret sted. Sørg for, at opbevaringsstedet er opvarmet i den kolde årstid. Sørg også for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation. Ellers kan der ophobes fugt på delene og kan beskadige produktet.

Placer rollatoren på en fast, plan overflade med en ikke-ridsende overflade. Hvis det er muligt, skal du dække det med et tæppe eller presenning. Sådan beskytter du rollatoren mod støv og anden snavs.




14. TEKNISKE DATA

Materiale	Aluminium
Min. Højde	79 cm
Max Højde	96 cm
Sædehøjde	54 cm

14. TEKNISKE DATA

Sædebredde	46 cm
Længde	73 cm
Dybde	65 cm
Max. Brugervægt	136 kg
Vægt	8 kg
Diameter Hjul	20 cm
Materiale Hjul	PVC
Materiale indkøbsnet	Stof
Anvendelsesområde	Indendørs og udendørs

15. BORTSKAFFELSE

Ikon	Beskrivelse
	<p>Emballagen beskytter mod transportskader ved levering. Emballagematerialet kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde og indleveres til genbrug. Vi anbefaler, at du bortskaffer den leverede emballagefilm med det samme og, at det opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>Hvis emballagen anvendes forkert, kan den medføre kvælning.</p>
 	<p>Hvis du ikke længere bruger produktet, skal det bortskaffes i henhold til gældende regler i din kommune. Produktet må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald, den skal afleveres på din lokale genbrugsstation. Dette sikrer, at produktet bortskaffes korrekt, og at det ikke har negative miljøpåvirkninger.</p>

Lindebjerg A/S
Stensgaardvej 14
5500 Middelfart
Danmark

E-mail: mail@lindebjerg.dk
Tlf. 63 15 00 00

www.lindebjerg.dk



Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.